

**Afrikanische Schweinepest – Monitoring
Merkblatt Probennahme Tupfer beim Wildschwein**

Was:

Blut bzw. bluthaltige Flüssigkeiten

Wie:

1. Stichkanal hinter dem linken Schulterblatt Richtung Herz präparieren (siehe Fotos)
2. Tupfer aus Röhrchen entnehmen, in den Stichkanal einführen und mit Blut oder bluthaltiger Flüssigkeit tränken
3. Danach Tupfer wieder zurück in Röhrchen stecken. Untersuchungsauftrag ausfüllen.
4. Untersuchungsauftrag und Röhrchen mit Tupfer in Tüte stecken, die Tüte mehrmals umschlagen und die überstehenden Drahtfahnen nach innen knicken.

